

evident®


das Dentalstudio

ZahnärztInnen sind jetzt noch flexibler



Flexible Teil-Prothesen
Jetzt neu bei EVIDENT

ÜBERBLICK

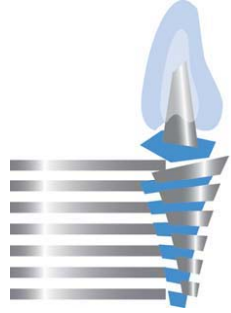

Valplast® - Der ideale Zahnersatz

2

Perfekter geht's nicht. Ästhetisch, Allergie frei, transluzent, unzerbrechlich und Kosten günstig.


**FRISCH
IMPORTIERT:
VALPLAST®**

Der erste **anpassungsfähige** Zahnersatz
Infos unter www.evident.at

Zahntechnik-Labor EVIDENT
1080 Wien, Bennoplatz 8 — office@evident.at — www.evident.at — M +43/699/11 44 18 11 — T +43/1/408 36 00 — F +43/1/408 36 00-99



evident®
das Dentalstudio

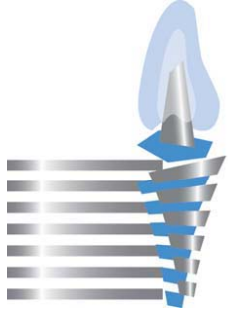


Valplast® - Vorteile für PatientInnen

3

- Kostengünstige Alternative zu feststehendem Zahnersatz
- keine Reparaturen (da unzerbrechlich)
- frei von ästhetisch störenden Metall-Klammern
- Prothesen-Stärke nur 1,2 - 1,4 mm
- kompakt und sehr flexibel
- hoher Tragekomfort
- keine Belastung von Restzähnen und Knochen-Substanz
- Natürlichkeit durch hohe Transluzenz (Zahnfleisch scheint durch)
- ideal für Kunststoff-Allergiker (aus biokompatiblen Nylon)



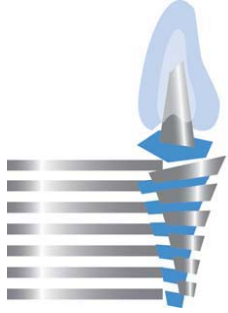

Valplast® - Vorteile für ZahnärztInnen


4

Valplast:

- besteht aus thermoplastischem Nylon
- ist höchst flexibel und biokompatibel

Physikalische und ästhetischen Eigenschaften:

- Granulat-Farben Rosa und Kristallklar
- unzerbrechlich
- geeignet zur Prothesen-Erweiterung bzw. -Unterfütterung
- hervorragend geeignet für die Interims-Versorgung bei Implantaten während der Einheilphase
- natürliche Optik durch hohe Transluzenz (Zahnfleisch-Farbe scheint durch)
- ideal für PMMA-Allergiker (kein Rest-Monomer)
- hohe Ästhetik
- überdurchschnittliche PatientInnen-Zufriedenheit

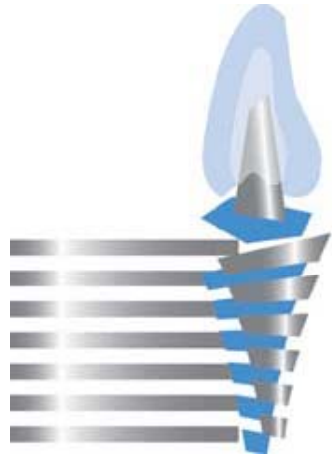

evident®


das Dentalstudio

Die Dritten, die fast so
gut wie die ersten sind



Flexible Teil-Prothesen
Jetzt neu bei EVIDENT

E I N F Ü H R U N G

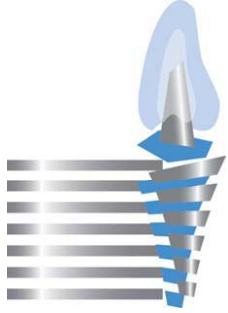


Valplast® - Zertifizierungs-Training

6

Inhalte:

- Valplast-Basis-Infos
- Anwendung von Valplast-Teil-Prothesen
- Herstellen von Valplast Prothesen
- Fallstudien-Analyse
- spezielle Valplast-Anwendungsgebiete
- ggf. Fehler-Besprechung



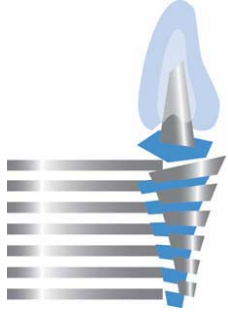


Valplast® hat viele gute Eigenschaften

7

Valplast:

- ist ein hochflexibles Prothesen-Material
- besteht aus biokompatiblen, thermoplastischem Nylon
- besitzt einzigartige physikalische und Ästhetische Eigenschaften
- ist unzerbrechlich



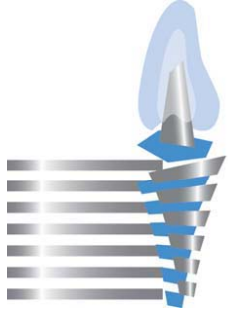

Valplast® - Die Entstehungs-Geschichte


8

Ursprünglich wurden für die Herstellung von Zahnersatz Materialien wie Kautschuk und Ebonit – später Chrom, Kobalt und Acryl verwendet.

Trotz ständiger Weiterentwicklung in der Verarbeitung von Klammer-Prothesen blieb das ästhetische Problem sichtbarer (und oft auch als störend empfundener) Klammern lange ungelöst.

Mit Valplast setzt hier eine neue Ära ein.



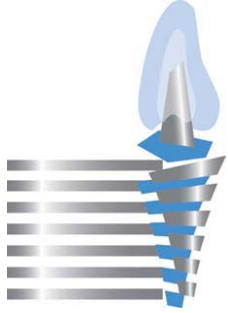


Valplast® - Ein wenig Statistik

9

Viele ZahnärztInnen haben leider nicht die Möglichkeit, die Langzeit-Effekte konventioneller Teil-Prothesen über Jahre hinweg systematisch zu beobachten.

Doch selbst hochprofessionell gefertigte Prothesen büßen mit der Zeit an Funktionalität ein.

- 25 % aller Prothesen werden nach 5 Jahren ausgetauscht
- 50 % aller Prothesen werden nach 10 Jahren ausgetauscht
- 60 % der angrenzenden Zähne benötigen nach 5 Jahren eine Behandlung
- 80 % der angrenzenden Zähne benötigen nach 10 Jahren eine Behandlung

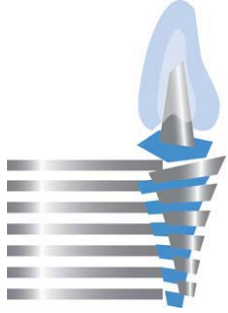


Valplast® - Die klügere Prothese gibt nach

10

Die langjährige Forschung hat sich gelohnt.

Denn die Valplast-Firmengründer entwickelten schließlich ein flexibles thermoplastisches Material, das sie Valplast nannten.



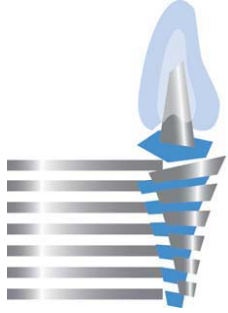

Valplast® schafft Druckausgleich


11

Druck = Kraft x Fläche


Wie jedes Material ist auch eine Prothese verschiedensten Kräften ausgesetzt.

Im Hinblick auf die Kombination von Zahn- und Gewebe-tragenden Elementen spielt hier Druck eine große Rolle.


Die Starrheit der Komponenten erfordert somit eine möglichst ausgewogene Druckverteilung.

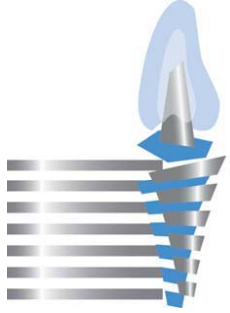


Valplast® - fest versus flexibel

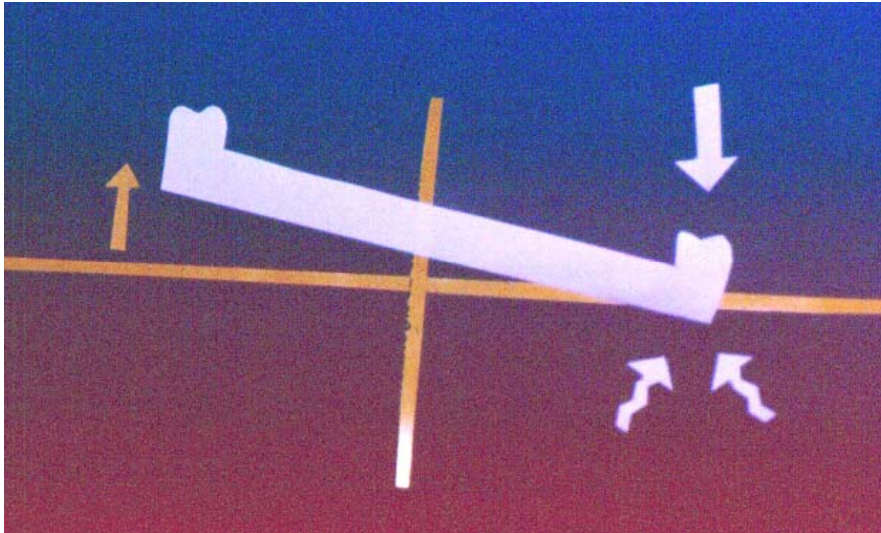

Punktlast bei festem Sattel

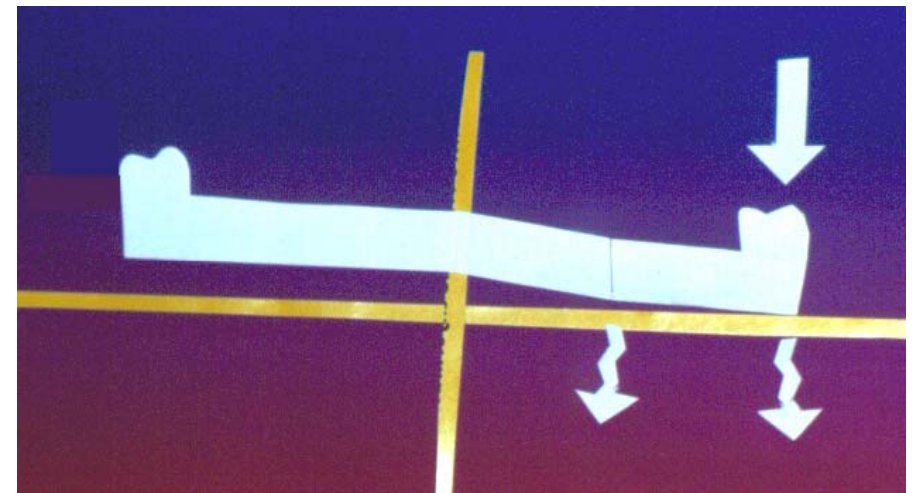


Druckverteilung bei
flexiblem Sattel

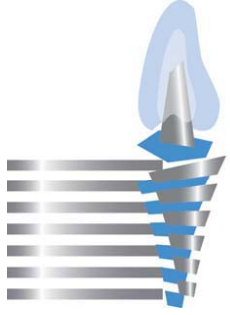

Kunststoff-Teil-Prothese mit Metallklammern



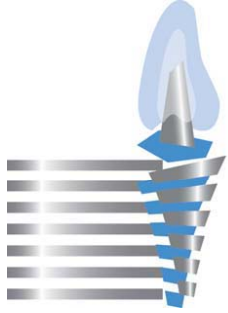


Valplast[®]-Teil-Prothese

14

Zu beachten sind die Ablagerungen, die sich unter den Metall-Klammern gebildet haben



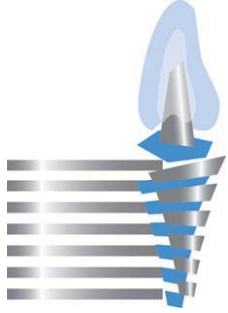


Valplast® - Vorteile auf einen Blick

15

Valplast-Fakten:

- Ästhetik ohne Metallklammern
- Transluzenz, denn die natürliche Zahnfleischfarbe der PatientInnen schimmert durch und ergibt somit ein Farb-harmonisches Bild des gesamten Gewebes
- hervorragende Alternative für PMMA-Allergiker, denn Valplast ist frei von Restmonomer
- Gewebe-neutral
- keine Verfärbungen
- kein Absorbieren von Gerüchen
- Ausgewogene Druck-Verteilung
- natürliche Optik



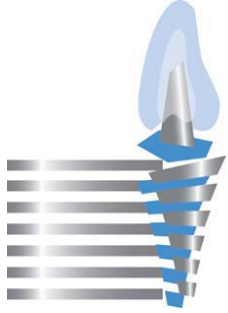


Valplast® - Langzeit-Effekte

16

Die Flexibilität des Teil-Prothesen-Materials:

- führt zu einer sanften Massage des Zahnfleisches
- verhindert den Hebeleffekt, der bei konventionellen Prothesen zu einer unausgewogenen und oft schmerzhaften Kräfteverteilung führt

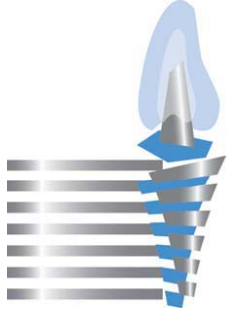

Valplast® - International auf Erfolgskurs


17

Valplast ist ein zertifiziertes US-Medizinprodukt.

Mittlerweile liegen Jahrzehnte lange Erfahrungen von Millionen Prothesen-Trägern vor.

Heute wird Valplast auf der ganzen Welt sehr erfolgreich eingesetzt. Ausgehend von den USA über Australien, Japan, Kanada und Neuseeland fand Valplast seinen Weg nach Europa. Auf Spanien, Italien und Schweden folgte Deutschland.

Und seit 2007 gibt es Valplast über EVIDENT auch in Österreich.

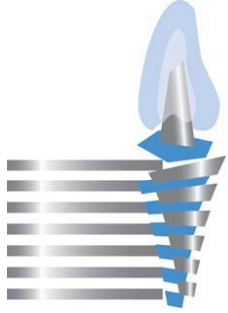



Valplast® - PatientInnen-Vorteile

18

Die Valplast-Teil-Prothese:

- ist eine günstige Alternative zu feststehendem Zahnersatz
- ist frei von ästhetisch störenden Metallklammern
- ist dünnwandig, kompakt und hochflexibel
- garantiert höchsten Trage-Komfort
- vermeidet unnötige Belastung von Restzähnen und Knochensubstanz
- ist transluzent
- verleiht über hohe Ästhetik neues Selbstbewusstsein
- ist aus biokompatiblen Nylon und somit eine hervorragende Alternative für Kunststoff-Allergiker

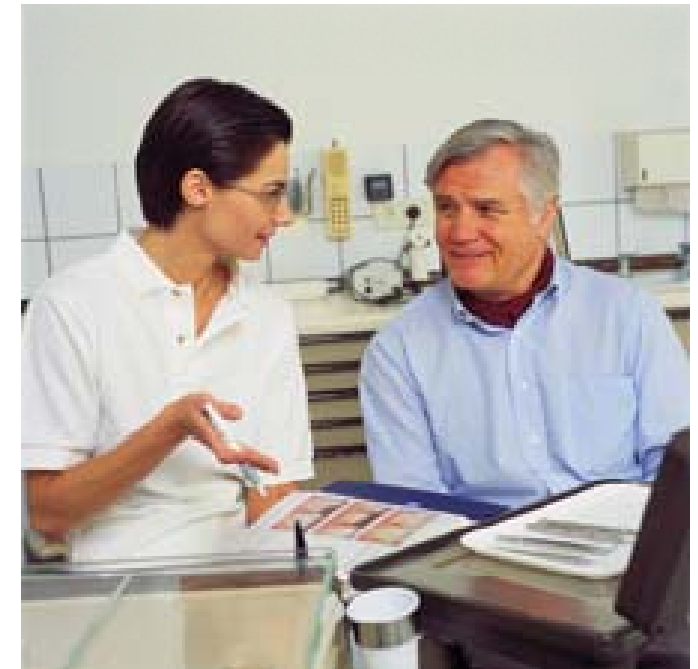

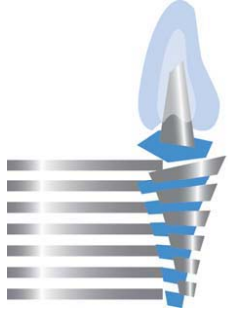

Valplast® - Vorteile für ZahnärztInnen


19

Mit Valplast:

- können auch PatientInnen prothetisch versorgt werden, die eine günstige Alternative zu feststehendem Zahnersatz suchen
- geben Sie Ihren PatientInnen einen Zahnersatz von höchstem Komfort
- verleihen Sie Ihren PatientInnen über hervorragende Ästhetik neues Selbstbewusstsein
- sind PatientInnen laut Umfragen außerordentlich zufrieden

Mundpropaganda wirkt!



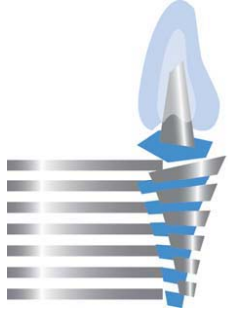


Valplast® - Vorteile für das Zahnlabor

20

- problemloses Aktivieren der Klammern jederzeit möglich
- nicht Kosten deckende Reparaturen entfallen,
- weil Valplast unzerbrechlich ist
- gilt als PMMA-freie Prothese trotz medizinischer Indikation als Sonder-Kunststoff
- Erweiterung des ZahnärztInnen-Kundenstammes über neues, bezahlbares und ästhetisch hochwertiges Zahnersatz-Produkt



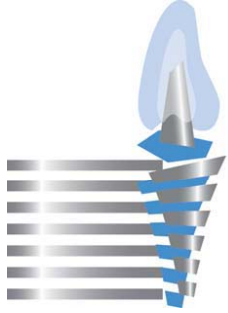

Valplast® - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

21


Kann Valplast alle Probleme der partiellen Restauration lösen? – Das kann bisher kein Produkt.

Entscheidend ist, dass Valplast die meisten Nachteile konventioneller Prothesen kompensiert.

Und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Deshalb konzentriert sich Valplast auf deutliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Teil-Prothesen vor allem in punkto:

- Ästhetik
- Funktion und
- Haltbarkeit

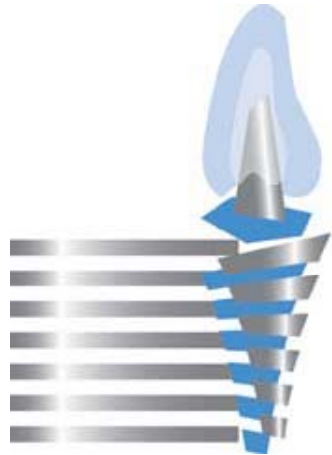

evident®


das Dentalstudio

PatientInnen
werden begeistert sein



Flexible Teil-Prothesen
Jetzt neu bei EVIDENT

A N W E N D U N G

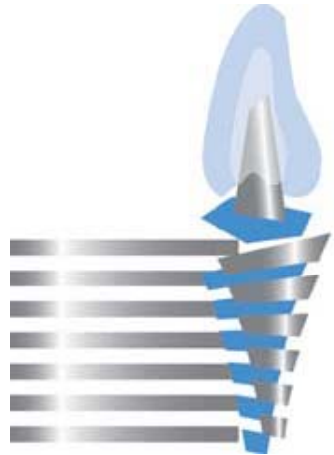

evident®

das Dentalstudio


VALPLAST®

Aktuelle
Fall-Studien

Status 2008



www.valplast.at

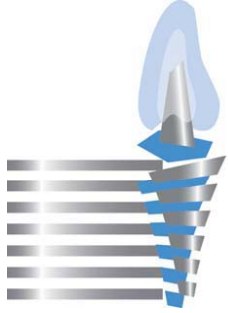

VALPLAST® - Monoreduktoren

„Mit VALPLAST-Monoreduktoren zeigt der Patient hohe Zufriedenheit und gute Ästhetik im Frontzahnbereich.“




unversorgt



VALPLAST-Monoreduktor



mit VALPLAST

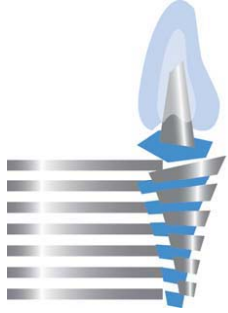

VALPLAST® - Monoreduktoren



PMMA-Interims-Prothese



PMMA-Interims-Prothese




VALPLAST Monoreduktor



VALPLAST-Monoreduktor

„Der Vergleich der OHIP-G 14 Fragebögen vor und nach Insertion der VALPLAST-Prothesen zeigt z. T. signifikante Unterschiede.“

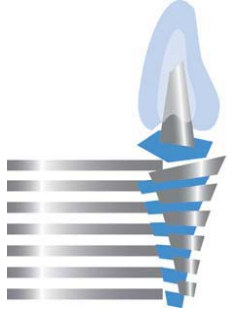

VALPLAST® - Monoreduktoren



VALPLAST-Prothese



unversorgt




VALPLAST-Monoreduktor



VALPLAST-Monoreduktor

„Der Vorstudie zufolge lassen objektiv visuelle Ergebnisse und subjektive Eindrücke der Probanden hohe Zufriedenheit mit dieser Art von prothetischer Versorgung erwarten.“

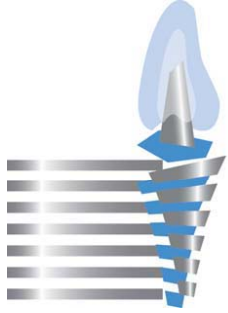


VALPLAST® - Biss-Schiene

Farbe / Weiß-Transparent
Hervorragende Trage-Eigenschaften



VALPLAST-Biss-Schiene



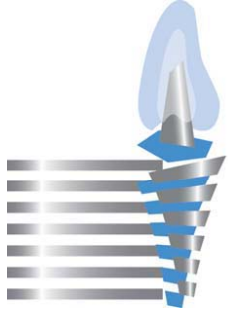


Voll-Prothese bei Knochentuberosität

28


Die flexiblen Klammern eignen sich hervorragend für Fälle, die nicht operierbare oder große Spalten haben



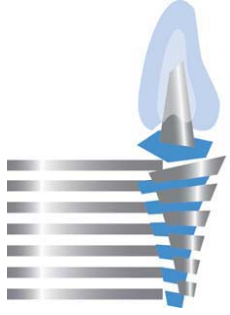



13-Jähriger mit hypohidrotischer
ektodermaler Dysplasie



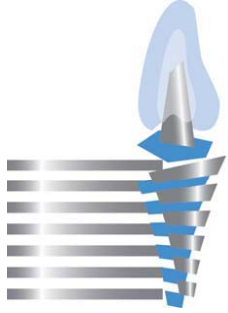

Hervorragende Ästhetik und guter Halt ohne labiale Haken

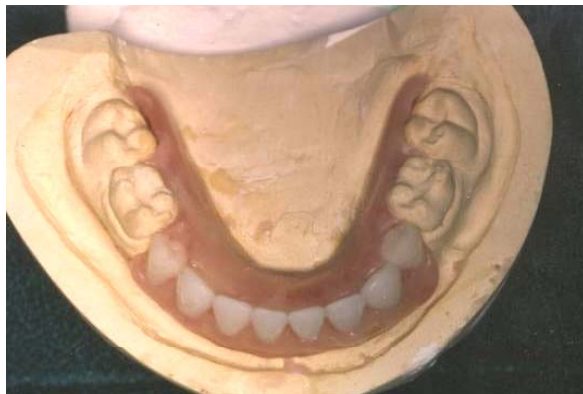

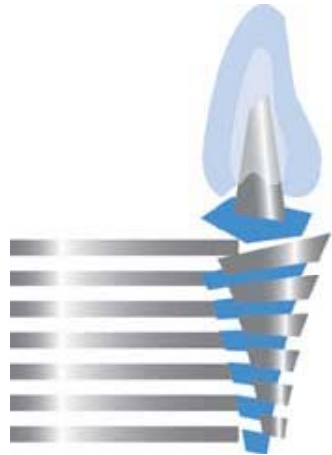

evident®


das Dentalstudio

Über Ihr Interesse
freuen wir uns



Flexible Teil-Prothesen
Jetzt neu bei EVIDENT

Ü B E R E V I D E N T

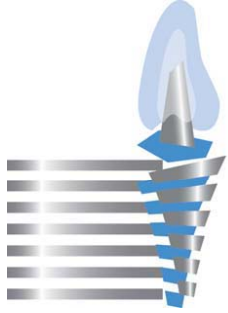

EVIDENT – Ihr verlässlicher Partner


33

EVIDENT steht für 25 Jahre Berufserfahrung.

Gut versorgte zufriedene PatientInnen sind unser wichtigstes Ziel. Sein Lächeln vertraut man schließlich nicht jedem an!


Laufende Fortbildung des gesamten Teams und permanenter fachlicher Erfahrungsaustausch sind bei evident ein Muss. Die besten Ergebnisse resultieren aus wohl überlegtem Einsatz bewährter Techniken in Kombination mit neuen Materialien und Erfahrung.

Ob Sie EVIDENT als dauerhaften Zahntechnik-Partner, als Troubleshooter in Zeiten großer Auslastung oder als Urlaubsvertretung nutzen, evident punktet mit solider, anspruchsvoller Qualitäts-Arbeit, kurzen Lieferzeiten, Verlässlichkeit und einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Probieren Sie's aus!

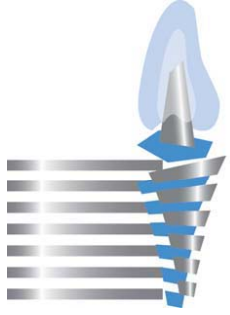

EVIDENT – Der Standort



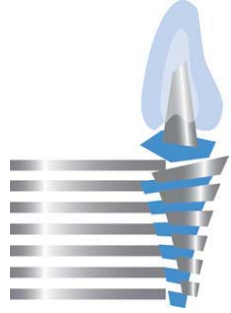

EVIDENT – Lageplan

